


## COMMENT PRENDRE UNE TEMPÉRATURE

Note: il est recommandé d'attendre 15 minutes avant de prendre une température corporelle si la personne a fait de l'exercice, a pris un bain ou une douche, ou a fumé. Si le thermomètre a été rangé dans un lieu où la température était très haute ou très basse, laissez le thermomètre s'ajuster à la température ambiante 15 minutes avant de l'utiliser. Attendez au moins 5 secondes entre deux prises de température.

1. Avant de prendre une température, assurez-vous qu'il n'y ait pas de courants d'air (par exemple, l'air conditionné doit être éteint, etc.).
2. Poussez les cheveux vers l'arrière et essuyez la transpiration de la zone temporale du front.
3. Visez le front, sur la zone temporale droite, à une distance d'environ 3 à 5 cm. Appuyez ensuite sur le bouton de prise de température et la température s'affichera automatiquement à l'écran.

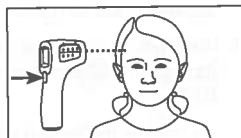

Si la température est de 38°C (100.4°F) ou plus, le thermomètre émettra 6 bips et l'écran deviendra rouge, indiquant ainsi une forte fièvre.

Si la température est entre 37.4°C et 37.9°C (99.3°F et 100.2°F), le thermomètre émettra 1 bip et l'écran deviendra orange, indiquant ainsi une légère fièvre.

Autrement, le thermomètre émettra 1 bip et l'écran deviendra vert, indiquant ainsi que la température est normale.

Note: si le seuil par défaut de l'alerte sonore a été changé, seule l'alerte sonore sera pertinente, et non la couleur du rétroéclairage.

4. Attendez de 3 à 5 secondes entre deux prises de température.
5. L'appareil s'éteindra automatiquement après 5 secondes.

## SPÉCIFICATIONS

Conditions normales d'utilisation	• Température ambiante: 10°C~40°C (50°F~104°F). • Humidité relative: ≤ 85%.
Piles	2 x piles AA alcalines.
Taille de l'appareil	16 cm x 10 cm x 4 cm (6,3" x 4" x 1,6").
Poids de l'appareil	131 g (sans les piles).
Plage de mesures	Note: en mode Body/Corps, l'écran rétroéclairé peut se colorer de 3 manières différentes. - Vert: ≤ 37.3°C (99.1°F), qui signifie une température normale. - Orange: 37.4°C - 37.9°C (99.3°F - 100.2°F), qui signifie une faible fièvre. - Rouge: ≥ 38°C (100.4°F), qui signifie une forte fièvre. • En mode Body/Corps: 32°C ~ 42.9°C (89.6°F ~ 109.2°F). • En mode Surface: 0°C - 60°C (32°F - 140°F). • En mode Air: 0°C - 40°C (32°F - 104°F).
Précision	Note: Le thermomètre à infrarouges sans contact ProScan™ peut lire les températures situées sous 32°C ou au-delà de 42.9°C (89.6°F - 109.2°F). Toutefois, sa précision n'est pas garantie hors des plages ci-dessous. • 32.0°C - 34.9°C (89.6°F - 94.8°F) ± 0.3°C (± 0.6°F) • 35.0°C - 42.0°C (95°F - 107.6°F) ± 0.2°C (± 0.4°F) • 42.1°C - 42.9°C (107.8°F - 109.2°F) ± 0.3°C (± 0.6°F)
Consommation	≤ 450 mW.
Distance de mesure	3 cm - 5 cm (1,2" - 2").
Arrêt automatique	30 secondes.
Longévité	40 000 prises de températures.
Garantie	18 mois.

Note: le fabricant se réserve le droit de modifier les spécifications du produit sans avis préalable.